
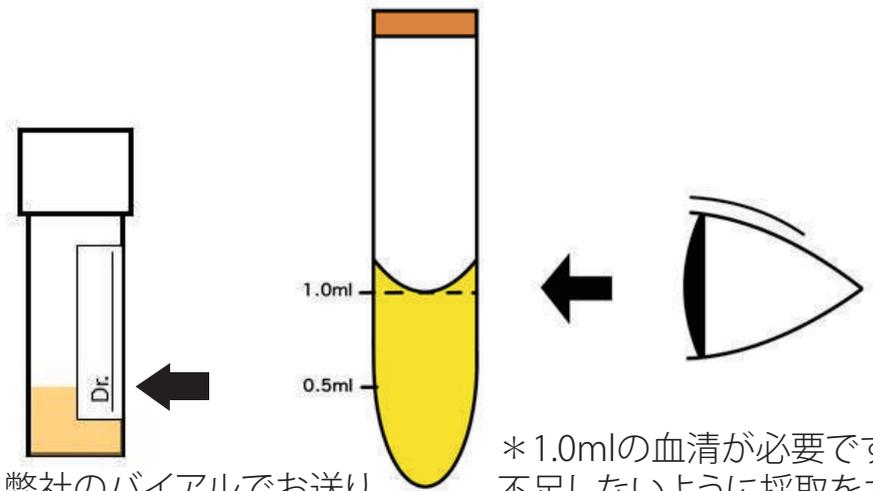


SPOT Test

検体採取・発送マニュアル

△ 検体：血清1.0ml(常温保存可)

弊社にて検査キットをご用意しておりますので、お気軽にご連絡ください。
病院様でお持ちのバイアルでお送りいただくことも可能です。
採取方法でご質問等ございましたら、お電話かメールにてお問合せください。

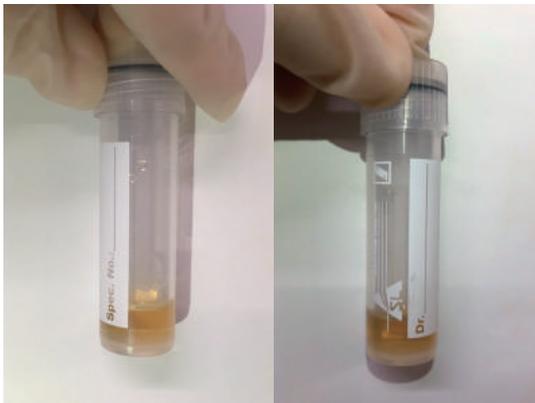

弊社のバイアルでお送り
いただく際はDの文字に
被る程度まで入れてくだ
さい。

*1.0mlの血清が必要です。
不足しないように採取をお
願いたします。

△ 送付準備

キャップをしっかりと閉め、パラフィルムあるいはビニールテープ等で本体との
接合部分を巻いたあと、チャック付きビニール袋に入れてください。
送付及び保管の際は、緩衝材で包んでいただくと安心です。

△ 常温にて送付

常温でお送りいただくことが可能となっております。
採取後は早めのご発送をお願いいたします。
バイアルを緩衝材で包み、箱もしくは封筒に入れてお送りください。
宅急便、郵送どちらでもお送りいただけます。郵送の際は切手を貼って下さい。

△ 検査センターにて検査

検査結果返却まで7-10日程度、お時間をいただいております。
※検査結果はメールかFAXにて速報をお送りし、
同日中に結果書類をヤマト運輸様のDM便にて発送いたします。